



El conector tiene colores diferentes según el diámetro de cada sonda.

Sonda con Tecnología de Superficie Urotonic[™]. Permite insertar y retirar la sonda con la mínima fricción.

Indicación

La sonda hidrofílica de un solo uso LoFric[®] Dila-Cath[™] está indicada para la dilatación uretral.

Esterilización y caducidad

Esterilizada con óxido de etileno. La información sobre la caducidad se encuentra impresa en el envase.

Presentación

100 sondas por caja.

Composición

Cubierta con superficie hidrofílica: Polivinilpirrolidona (PVP) y cloruro sódico (NaCl).


Sonda: Cloruro de polivinilo de grado médico (PVC).

Envase estéril: Película de papel lacado, laminada con polypropileno (PP) y polietileno (PE).


Gama de producto

Referencia	Tipo	Longitud	Calibre
89 16 00	LoFric [®] Dila-Cath [™] Nelaton	40 cm	CH 16
89 18 00	LoFric [®] Dila-Cath [™] Nelaton	40 cm	CH 18


Instrucciones de uso

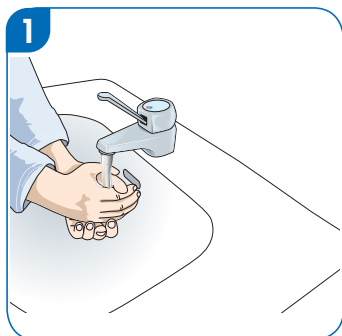


1. Lávese las manos con agua y jabón.

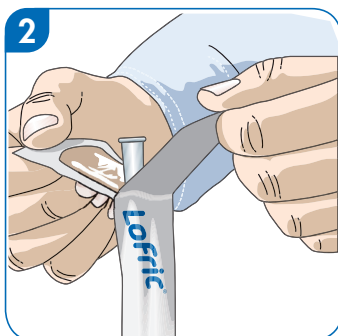


2. Abra el envase separando las lengüetas 5-6 cm.

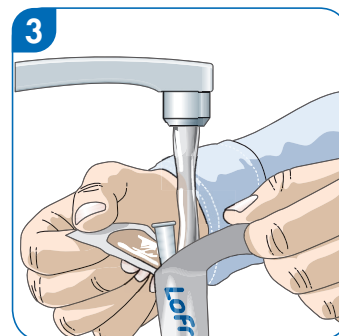

3. Introduzca el agua del grifo directamente en el envase. Llene el envase de agua prácticamente hasta arriba. También se puede utilizar agua embotellada, agua estéril o suero fisiológico.

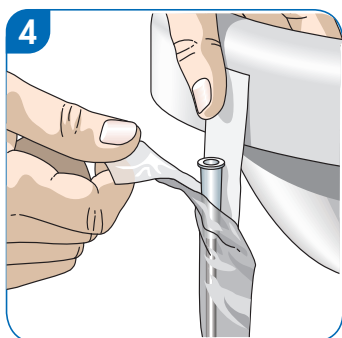

4. El envase tiene una tira adhesiva. Retire la tira protectora azul y péguelo a una superficie seca.

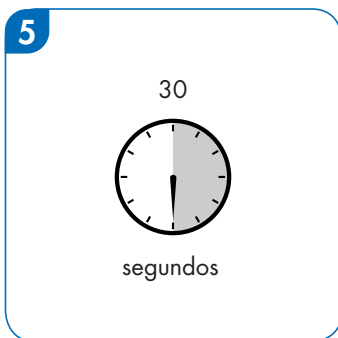

5. Deje la sonda sumergida en agua durante 30 segundos, mientras se prepara para el sondaje. Realice la dilatación de inmediato.